

DracoFoam **haft**

Schaumstoffverband mit Haftrand

Inhalt: 10 Stück, 7,5 x 7,5 cm

Lagertemperatur max. 25 °C, kühl und trocken lagern.

Gebrauchshinweise:

DracoFoam haft ist ein Schaumstoffverband bestehend aus einem hydrophilen absorbierenden Polyurethanschaum und einer selbstklebenden Polyurethanfolie unter Verwendung eines hautfreundlichen Acrylatklebers. Die Polyurethanfolie bietet geringen Reibungswiderstand und stellt eine Barriere für Bakterien dar. Der Polyurethanschaum ist besonders flexibel, angenehm zu tragen und hat ein hohes Exsudataufnahmevermögen. **DracoFoam haft** schafft ein idealefeuchtes Wundklima und ist besonders für stark exsudierende chronische und akute Wunden geeignet.

Anwendungsgebiete sind Wunden mit hohem Exsudataufkommen, z.B. oberflächliche und tiefere chronische Wunden wie Ulcus cruris oder Dekubitus, Schürf- und Schnittwunden, Spalthautentnahmestellen und postoperative Wunden.

DracoFoam haft soll **nicht angewendet** werden bei

- chirurgischen Implantaten
- klinisch infizierten Wunden
- Verbrennungen 3. Grades



Gegenanzeigen:

DracoFoam haft soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Empfindlichkeit gegenüber Polyurethan oder Acrylatkleber angewendet werden.

Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam haft** die Wunde reinigen und die Wundumgebung sorgfältig trocknen. **DracoFoam haft** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen und mit der weißen Schaumstoffseite leicht auf die Wunde auflegen und die Kleberänder sanft auf die Haut andrücken. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schaumaufgabe ca. 2 cm über die Wundränder hinausgeht. Aufgrund seiner selbsthaftenden Eigenschaften wird kein Sekundärverband benötigt. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam haft** bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben.

DracoFoam haft darf nur einmal verwendet werden.

DracoFoam haft ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist.

DracoFoam haft nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.



Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus.

Die Beseitigung aller die Wundheilung hemmenden Faktoren ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

PZN: 6733293

REF: 13933



Dr. Ausbüttel & Co. GmbH
Herdecker Straße 9-15
58453 Witten
Telefon: 0 23 02 / 9 56 66 - 0
Telefax: 0 23 02 / 9 56 66 - 90
www.draco.de
E-Mail: info@draco.de

CE 0482

LOT

37487

2012-07

STERILE R

